


# LiNA SeaStar™ et LiNA Skin Hook™

Système à usage unique pour  
rétraction des tissus mous de  
surface

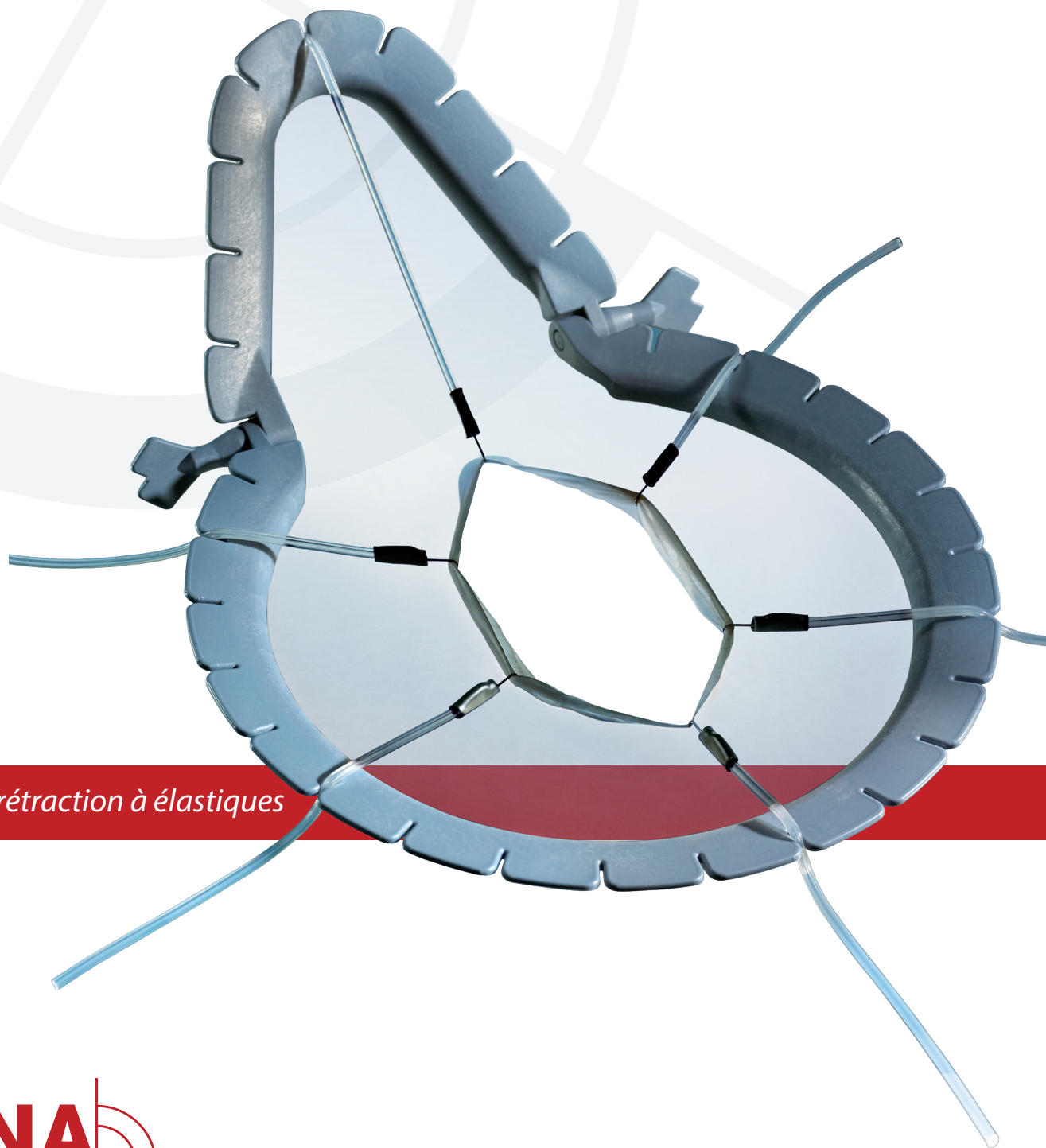


*Système de rétraction à élastiques*



Innovation en gynécologie

# LiNA SeaStar™ et LiNA Skin Hook™

Le LiNA SeaStar™ et le LiNA Skin Hook™ offrent une solution à usage unique de rétractation des tissus mous délicats. La conception flexible du système permet d'ajuster et de repositionner le LiNA SeaStar™ pendant les procédures chirurgicales et assure l'exposition du site chirurgical.

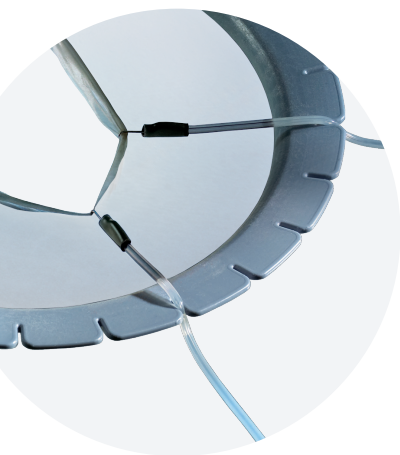

**Visibilité.** Auto-bloquant.

#### Libération des mains du chirurgien

Le LiNA SeaStar™ et le LiNA Skin Hook™ procurent un espace chirurgical et une visibilité améliorés. Cela vous permet de vous concentrer sur la procédure plutôt que sur la rétractation.


**Polyvalence.** Large éventail d'options disponibles.

#### LiNA SeaStar™


Le LiNA SeaStar™ est disponible dans une large gamme de formes et de tailles. Les cadres peuvent être ajustés pour s'adapter à diverses zones anatomiques, ce qui facilite les différentes applications chirurgicales, par exemple la chirurgie vaginale et rectale et d'autres disciplines chirurgicales.

#### LiNA Skin Hook™


Le LiNA Skin Hook™ est disponible avec quatre différents types de crochets en acier inoxydable : petit pointu, petit arrondi, petit angulé très pointu, grand arrondi. Les élastiques flexibles peuvent être ajustés au cours de la procédure pour créer une tension optimale.

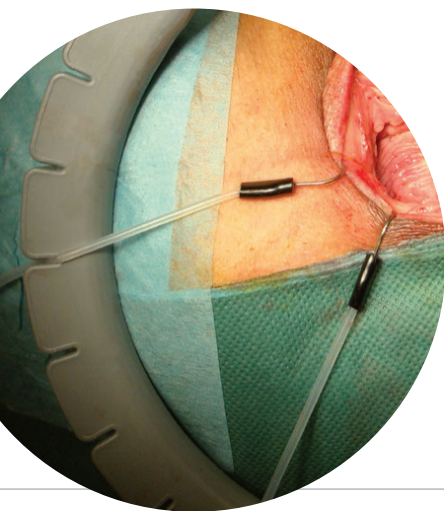


Préparez et drapiez la zone chirurgicale de la manière habituelle. Appliquez le LiNA SeaStar™ en suivant les étapes suivantes :

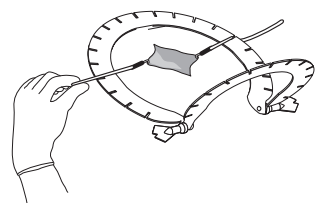

1. Placez le LiNA SeaStar™ autour de l'incision initiale et fixer le premier LiNA Skin Hook™ dans l'encoche puis le second LiNA Skin Hook™ dans l'encoche opposée en appliquant la même tension.

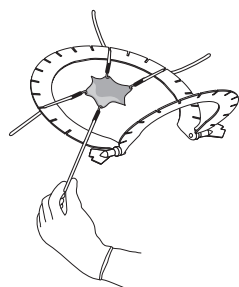

2. Au cours de la dissection, déplacez le LiNA Skin Hook™ vers les couches plus profondes du fascia. Vous pouvez ensuite ajouter de nouveaux LiNA Skin Hooks ou repositionner ceux qui sont déjà installés pour une rétraction équilibrée.

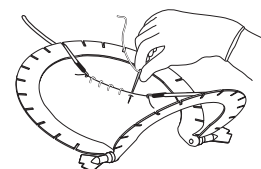


3. Maintenez une tension opposée constante pour faciliter la fermeture.


# LiNA SeaStar™ et LiNA Skin Hook™

Le LiNA SeaStar™ et le LiNA Skin Hook™ sont à usage unique.


Les LiNA Skin Hooks  
sont de taille réelle

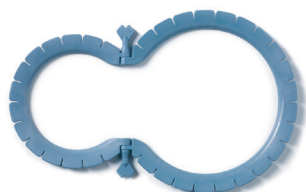

RÉF 4000-S-SL

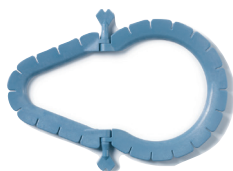


RÉF 4000-S-VS

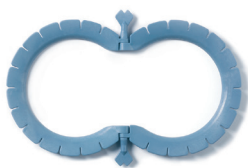


RÉF 4000-S-SS



RÉF 4000-S-VV

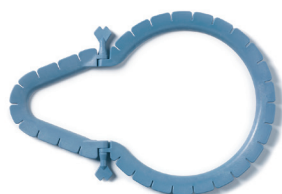

RÉF 4000-S-VL

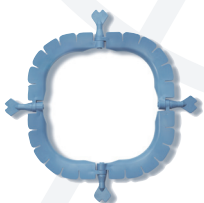

RÉF 4000-S-Q



RÉF SH-110  
Petit crochet pointu



RÉF SH-120  
Petit crochet arrondi



RÉF SH-130  
Petit crochet angulé très pointu



RÉF SH-220  
Grand crochet arrondi

## Informations de commande :

LiNA SeaStar™ et LiNA Skin Hook™ **CE 0459**

Code produit	Description	Emballage individuel
4000-S-SL	<b>LiNA SeaStar™</b> — Petit/grand. À usage unique.	Boîte de 5, stérile
4000-S-SS	<b>LiNA SeaStar™</b> — Petit/petit. À usage unique.	Boîte de 5, stérile
4000-S-VL	<b>LiNA SeaStar™</b> — En forme de V/grand. À usage unique.	Boîte de 5, stérile
4000-S-VS	<b>LiNA SeaStar™</b> — En forme de V/petit. À usage unique.	Boîte de 5, stérile
4000-S-VV	<b>LiNA SeaStar™</b> — En forme de V/en forme de V. À usage unique.	Boîte de 5, stérile
4000-S-Q	<b>LiNA SeaStar™</b> — Carré. À usage unique.	Boîte de 5, stérile
SH-110	<b>LiNA Skin Hook™</b> — Petit crochet pointu. À usage unique.	2 pièces dans un sachet, boîte de 5 sachets, stérile
SH-120	<b>LiNA Skin Hook™</b> — Petit crochet arrondi. À usage unique.	2 pièces dans un sachet, boîte de 5 sachets, stérile
SH-130	<b>LiNA Skin Hook™</b> — Petit crochet angulé très pointu. À usage unique.	2 pièces dans un sachet, boîte de 5 sachets, stérile
SH-220	<b>LiNA Skin Hook™</b> — Grand crochet arrondi. À usage unique.	2 pièces dans un sachet, boîte de 5 sachets, stérile

©2023 LiNA Medical ApS. Tous droits réservés.  
LiNA est une marque déposée de LiNA Medical dans l'UE, aux États-Unis et en Chine.

### Distributeur :

**Kebomed France**

● 300 rue du Noir Debout,  
Parc d'activité de Croisette,  
59242 Cappelle en Pevèle  
France

● Tel : 04 78 59 54 93  
Fax : 04 78 59 89 78  
info@kebomed.fr  
www.kebomed.fr

● Classe du dispositif : SeaStar - I, Skin Hook - IIa  
Nom et numéro de l'organisme notifié :  
LNE/G-MED # 0459

Document réservé à l'usage des Professionnels de Santé.

Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux.

### Fabricant :

**LiNA Medical ApS**

● Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Denmark

● Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

● www.lina-medical.com  
CVR: 10054974

ISO 13485:2016

Système de gestion de la qualité

