




# LiNA SeaStar™ et LiNA Skin Hook™

## Écarteur chirurgical et crochet pour tissus


Système complet permettant d'écarter les tissus mous de la surface opératoire




Préparer et recouvrir le champ opératoire comme d'habitude. Positionner le LiNA SeaStar comme indiqué ci-dessous:

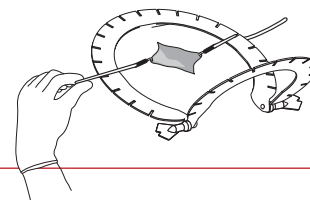

1. Positionner le LiNA SeaStar autour de l'incision initiale et insérer le LiNA Skin Hook du côté directement opposé en appliquant une tension identique.

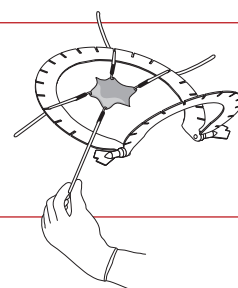

2. Au fur et à mesure de la dissection, accrocher le LiNA Skin Hook dans les couches de fascias plus profondes. Il est possible d'ajouter de nouveaux crochets ou de repositionner ceux déjà en place pour obtenir un écartement régulier dans tous les sens.

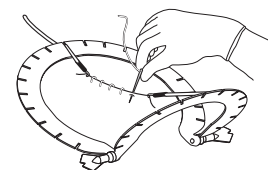

3. Pour suturer l'incision plus facilement, maintenir une tension opposée constante.

### Informations de commande:

LiNA SeaStar™ et Skin Hook™ **0459**

| REF : Usage unique, stérile | REF : Réutilisable, non stérile | Produit  | Emballage, usage unique              | Emballage, réutilisable |
|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------|
| 4000-S-Q                    |                                 | LiNA SeaStar – carré. 18 cm x 18 cm. 62 g. (7 in x 7 in 2,2 oz)        | Boîte de 5                           |                         |
| 4000-S-SS                   | 4000-R-SS                       | LiNA SeaStar – petit/petit. 29 cm x 19 cm. 75 g. (11 in x 7 in 2,6 oz) | Boîte de 5                           | Boîte de 1              |
| 4000-S-SL                   | 4000-R-SL                       | LiNA SeaStar – petit/gros. 35 cm x 22 cm. 94 g. (14 in x 9 in 3,3 oz)  | Boîte de 5                           | Boîte de 1              |
| 4000-S-VV                   | 4000-R-VV                       | LiNA SeaStar – en V/en V. 23 cm x 19 cm. 53 g. (9 in x 7 in 1,9 oz)    | Boîte de 5                           | Boîte de 1              |
| 4000-S-VS                   | 4000-R-VS                       | LiNA SeaStar – en V/petit. 26 cm x 19 cm. 64 g. (10 in x 7 in 2,3 oz)  | Boîte de 5                           | Boîte de 1              |
| 4000-S-VL                   | 4000-R-VL                       | LiNA SeaStar – en V/gros. 32 cm x 22 cm. 83 g. (13 in x 9 in 2,9 oz)   | Boîte de 5                           | Boîte de 1              |
|                             | 4000-R-SRW                      | LiNA SeaStar vis.  |                                      | Boîte de 10             |
| SH-110                      |                                 | LiNA Skin Hook – petit crochet pointu                                  | Pochettes de 2, boîte de 5 pochettes |                         |
| SH-120                      |                                 | LiNA Skin Hook – petit crochet arrondi                                 | Pochettes de 2, boîte de 5 pochettes |                         |
| SH-220                      |                                 | LiNA Skin Hook – gros crochet arrondi                                  | Pochettes de 2, boîte de 5 pochettes |                         |

Distributeur : **KEBOMED**

4, rue du docteur Pravaz  
69110 Sainte-Foy-lès-Lyon  
France

Tel : 04 78 59 54 93  
Fax : 04 78 59 89 78  
info@kebomed.fr

www.kebomed.fr



Fabricant : **LiNA Medical ApS**

Formervangen 5  
DK-2600 Glostrup  
Denmark

Tel.: +45 43 29 66 66  
Fax: +45 43 29 66 99  
info@lina-medical.com

www.lina-medical.com  
CVR: 10054974

# LiNA SeaStar™ et LiNA Skin Hook™

LiNA SeaStar et LiNA Skin Hook forment un système complet permettant d'écarter les tissus délicats comme les tissus plus épais. La flexibilité du système permet d'ajuster et de repositionner facilement le LiNA SeaStar pendant les opérations chirurgicales et offre un accès optimal à la zone chirurgicale.

## sécurité

### Autonome

- Le LiNA SeaStar et le LiNA Skin Hook forment un système d'écartement autonome permettant au chirurgien et à son assistant de garder les mains libres pour les autres tâches.


## fonctionnalité

### Large gamme d'écarteurs LiNA SeaStar


- LiNA SeaStar**  
Le LiNA SeaStar est disponible dans une large gamme de formes et de tailles ; il peut ainsi s'adapter à toutes les zones anatomiques et faciliter différentes applications chirurgicales telles que la chirurgie vaginale ou rectale, par exemple.
- LiNA Skin Hook**  
Fixer le LiNA Skin Hook sur le LiNA SeaStar optimise l'exposition de l'incision. Le crochet flexible et élastique peut être ajusté pendant l'opération pour fournir une tension optimale. Le LiNA Skin Hook est disponible avec trois crochets inox différents.




Le LiNA SeaStar est disponible pour un usage unique (S) ou en version réutilisable (R), sauf le modèle carré, uniquement disponible pour un usage unique.

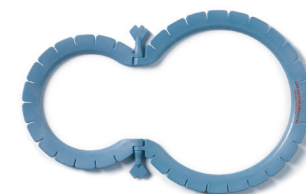


REF 4000-S-SL  
REF 4000-R-SL

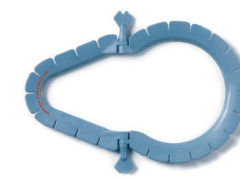


REF 4000-S-VS  
REF 4000-R-VS

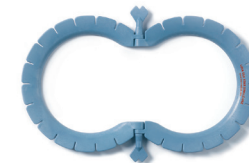


REF 4000-S-SS  
REF 4000-R-SS

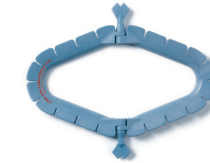

REF 4000-S-VV  
REF 4000-R-VV

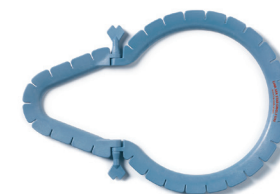

REF 4000-S-VL  
REF 4000-R-VL

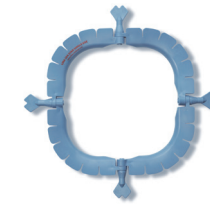

REF 4000-S-Q



REF SH-110  
Petit crochet pointu



REF SH-120  
Petit crochet arrondi



REF SH-220  
Gros crochet arrondi