


LiNA Xcise™

Morcellateur laparoscopique sans fil

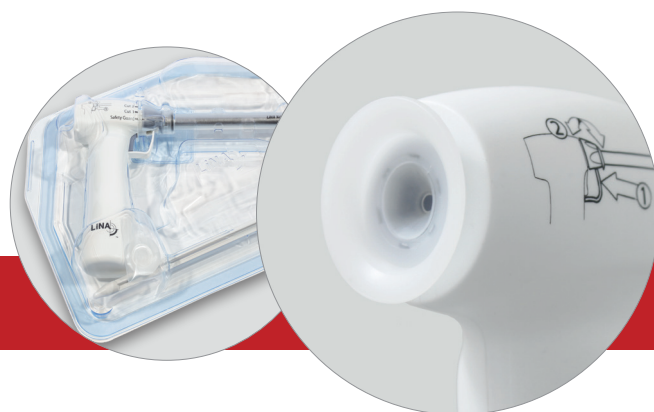

Couper le cordon



Innovation en gynécologie

LiNA Xcise™

Morcellateur laparoscopique sans fil



Simplification du geste

Conception à usage unique immédiatement utilisable.

Ne nécessite aucun montage, ni boîtier de commande, ni câbles.

De conception légère et sans fil, le dispositif intègre le moteur et la batterie. Ouvrez l'emballage, insérez l'obturateur et vous pouvez démarrer le morcellement.



Sécurisation du geste

Contrôlez l'exposition de la lame.

Le LiNA Xcise™ offre 3 positions de lame pour sécuriser la manipulation pendant le procédé de morcellement des tissus.

Position
« Section 2 »



La lame est entièrement exposée pour une exérèse plus profonde.

Position
« Section 1 »



La lame est partiellement recouverte par la protection d'embout afin de réaliser un pelage tangentiel de la pièce.

Position
« Sécurité »



La lame est entièrement rétractée dans la canule, assurant la sécurité de la patiente.


Vitesse

Flared Tube Technology™ *

Le diamètre du tube est évasé (surligné en vert) créant un espace qui réduit la résistance entre le corps de la lame et le tissu sectionné afin d'en faciliter la traction. Ceci facilite l'obtention de bandes plus longues et réduit le nombre de cassures des tissus.

Moteur à couple élevé de ~1000 tr/min pour morceler les tissus.

*Technologie Tube Évasé

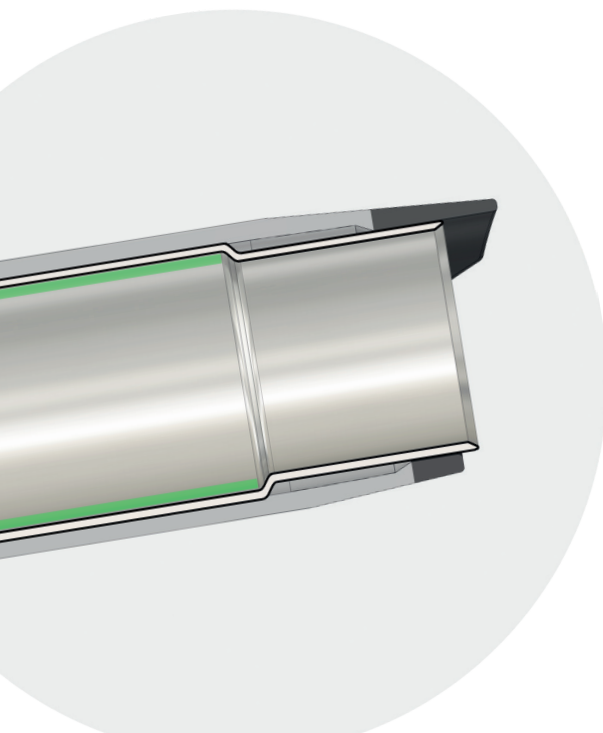


Protection d'embout réglable à 360°

Poignée ergonomique avec gâchette de précision
Fatigue de la main diminuée et contrôle amélioré grâce à la possibilité d'appuyer rapidement sur la gâchette.




A clipser
Embout réducteur de 5 mm

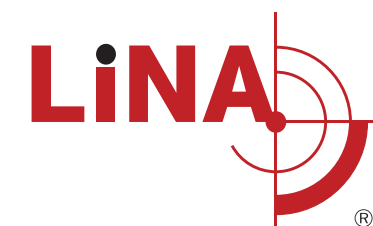


LiNA Xcise™

Morcellateur laparoscopique sans fil

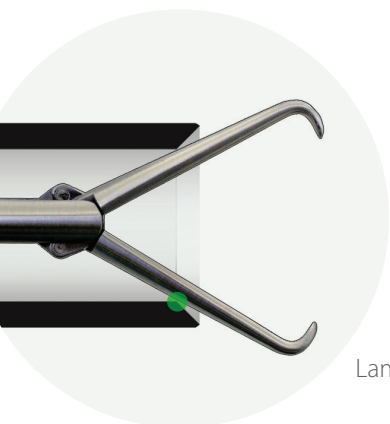

Lame à biseau interne – LiNA Xcise™

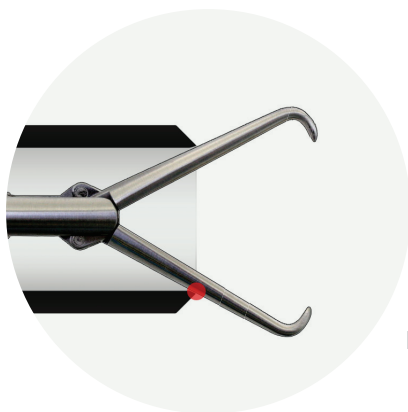

Lame à biseau externe

Coupe nette

Le tube en acier inoxydable est doté d'une lame circulaire large et biseautée évitant qu'elle ne s'émousse en cas de contact accidentel avec la pince à griffes.

Indications d'utilisation :

Indiqué pour la découpe, le carottage et l'extraction de tissus lors de laparoscopie opératoire, notamment d'interventions gynécologiques telles que l'hystérectomie et la myomectomie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi.

Informations de commande :

LiNA Xcise™ **CE 0459**

Code produit	Description	Emballage individuel
MOR-1515-1-I	LiNA Xcise™ — Morcellateur Laparoscopique 15 mm, avec batterie, système de morcellement et obturateur. Stérile, usage unique.	Boîte de 12 unités (emballage individuel)
MOR-1515-6-I	LiNA Xcise™ — Morcellateur Laparoscopique 15 mm, avec batterie, système de morcellement et obturateur. Stérile, usage unique.	Boîte de 6 unités

©2022 LiNA Medical ApS. Tous droits réservés.

LiNA est une marque déposée de LiNA Medical dans l'UE, aux États-Unis et en Chine.

Distributeur :

Kebomed France

● 300 rue du Noir Debout,
Parc d'activité de Croisette,
59242 Cappelle en Pévèle,
France

● Tel : 04 78 59 54 93
Fax : 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr
www.kebomed.fr

● Classe du dispositif : IIb
Nom et numéro de l'organisme notifié :
LNE/G-MED # 0459

Document réservé à l'usage des Professionnels de Santé

Avant toute utilisation, se référer à la notice qui accompagne les dispositifs médicaux

Fabricant :

LiNA Medical ApS

● Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

● Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

● www.lina-medical.com
CVR: 10054974

ISO 13485:2016
Système de gestion
de la qualité

