

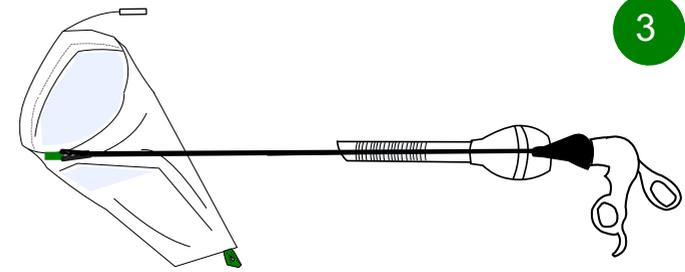


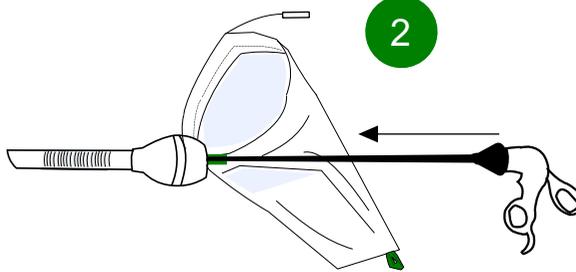




Systeme ESPINER de récupération des tissus

60, 70 & 100 ECO-Green avec cordon de serrage - Notice d'utilisation




1 Déployer l'ouverture du sac en premier.

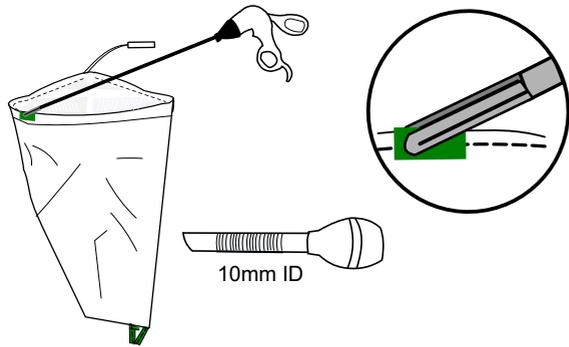

1 Déployer la base du sac en premier.

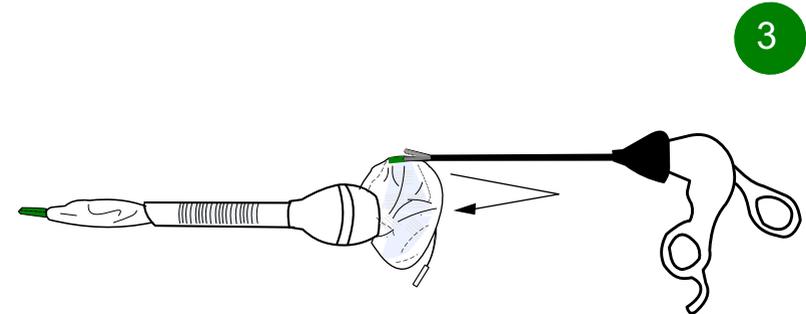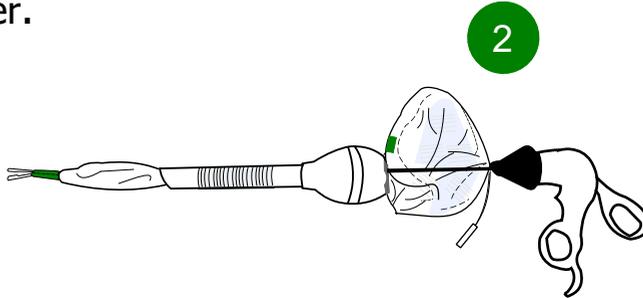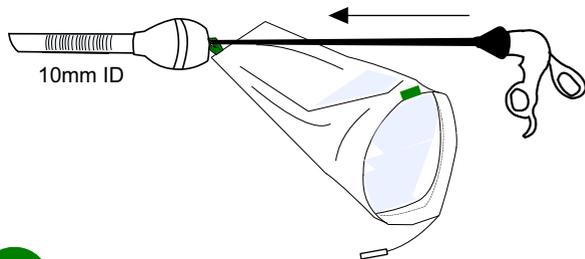

1 Préparer l'extraction du sac en tirant sur le cordon de fermeture.

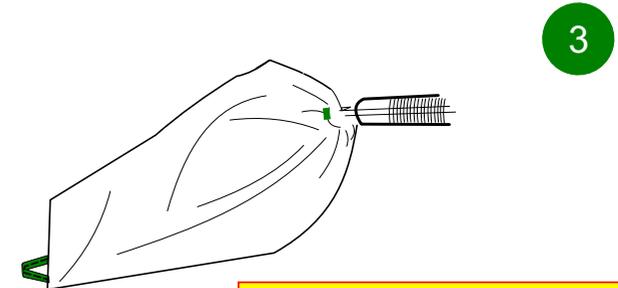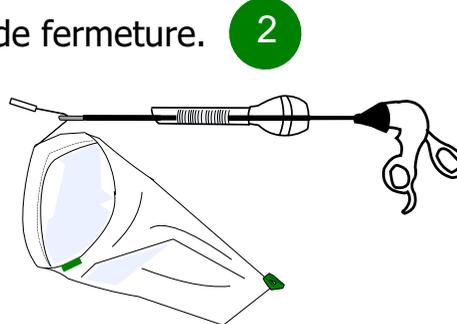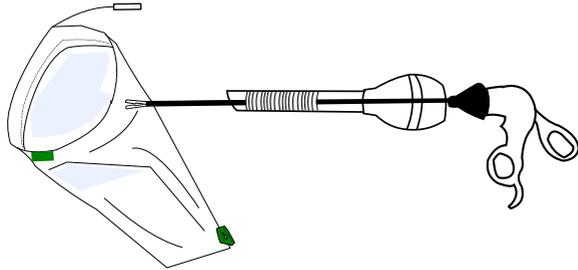

0120



Consult instructions for use



Single Use Only



Not made with latex



Store in a cool place



Do not use after expiry date shown on unit label

Espiner Medical Ltd
Yeo Bank 3, Clevedon
BS21 6TH UK
+44 (0)1275 878801

STERILE EO

Part no.E298/1

Attention : La loi fédérale (Etats-Unis) et l'Union Européenne limitent la vente, la distribution et l'utilisation de ce dispositif par ou sur recommandation d'un médecin.

Le fil en monofilament est conçu pour la fermeture du sac. Ne pas dépasser la limite de rupture de 8 kg.

Le dispositif doit être utilisé par des chirurgiens maîtrisant les techniques spécifiques prévues par ces dispositifs médicaux.