

LiNA AntiFog Solution™

Prévient la buée sur les cellules optiques des caméras pendant une chirurgie endoscopique



LiNA AntiFog Solution™

La gamme AntiFog Solution (solution antibuée) de LiNA Medical se compose de LiNA Elfred™, LiNA Clear Sight™ et LiNA Clear Sight Wipe™.

Fonctionnel. LiNA Elfred™

LiNA Elfred™ se compose d'une petite éponge emballée dans un récipient en feuille d'aluminium avec un adhésif au dos. L'éponge est pré-imprégnée de 6 ml d'AntiFog Solution (solution antibuée). LiNA Elfred™ est très commode à utiliser car il est simple à manipuler et prêt à l'emploi :

- 1) Retirer la bandelette adhésive sous le récipient et le fixer sur le champ opératoire ou la table à instruments.
- 2) Retirer le couvercle du récipient.
- 3) Presser l'endoscope sur l'éponge et le faire pivoter pour appliquer une fine couche d'AntiFog Solution (solution antibuée).
- 4) Si nécessaire, l'éponge peut être retirée du récipient pour nettoyer les bords de l'endoscope.

LiNA Elfred™ est disponible avec ou sans alcool.

LiNA Clear Sight™

LiNA Clear Sight™ se compose d'un flacon de 6 ml et d'une éponge avec un adhésif au dos. LiNA Clear Sight™ est simple à utiliser :

- 1) Fixer l'éponge sur le champ opératoire ou sur la table à instruments.
- 2) Ouvrir le flacon et verser la solution sur l'éponge.
- 3) Presser l'endoscope sur l'éponge et le faire pivoter pour appliquer une fine couche d'AntiFog Solution (solution antibuée).

LiNA ClearSight™ est disponible avec ou sans alcool.

LiNA Clear Sight Wipe™

LiNA Clear Sight Wipe™ est une lingette pré-imprégnée d'AntiFog Solution (solution antibuée) et emballée dans une pochette individuelle. LiNA Clear Sight Wipe™ est disponible uniquement sans alcool.



LiNA Clear Sight Wipe™



LiNA Clear Sight™



LiNA Elfred™

Informations de commande :

LiNA AntiFog Solution™ **CE**
0459

Code produit	Description	Quantité
CS-20	LiNA Elfred™ – 6 ml d'AntiFog Solution (solution antibuée) pour cellule optique d'endoscope. Stérile, à usage unique.	Boîte de 30 pièces
CS-20A	LiNA Elfred™ – 6 ml d'AntiFog Solution (solution antibuée) pour cellule optique d'endoscope avec 4 % d'alcool. Stérile, à usage unique.	Boîte de 30 pièces
CS-30	LiNA Clear Sight™ – 6 ml d'AntiFog Solution (solution antibuée) pour cellule optique d'endoscope. Stérile, à usage unique.	Boîte de 20 pièces
CS-30A	LiNA Clear Sight™ – 6 ml d'AntiFog Solution (solution antibuée) pour cellule optique d'endoscope avec 4 % d'alcool. Stérile, à usage unique.	Boîte de 20 pièces
CS-40	LiNA Clear Sight Wipe™ – Lingette stérile avec AntiFog Solution (solution antibuée) pour cellule optique d'endoscope. À usage unique.	Boîte de 30 pièces

©2021 LiNA Medical ApS. Tous droits réservés.

LiNA est une marque déposée de LiNA Medical dans l'UE, aux États-Unis et en Chine.

Distributeur :

KeBomed France

• 300 rue du Noir Debout,
Parc d'activité de Croisette,
59242 Cappelle en Pévèle
France

Tel.: 04 78 59 54 93
Fax: 04 78 59 89 78
info@kebomed.fr
www.kebomed.fr

• Classe du dispositif : IIa
Nom et numéro de l'organisme notifié :
LNE / G-MED # 0459

Document réservé à l'usage des professionnels de santé.

Avant toute utilisation, consulter le mode d'emploi fourni avec chaque dispositif médical.

Fabricant :

LiNA Medical ApS

• Formervangen 5
DK-2600 Glostrup
Denmark

• Tel.: +45 43 29 66 66
Fax: +45 43 29 66 99
info@lina-medical.com

• www.lina-medical.com
CVR: 10054974

Système de gestion de la qualité
EN ISO13485:2016

